

# Tekniset tiedot Yellow Label - injektioruisku




Alkuperäinen injektioruisku on Planet ID:n kehittämä ja tuottama (vaikkakin monet yritykset ovat jo kopioineet ideaa).

Planet ID:n injektioruisku on varustettu Luer -lukko yhdistelmällä. Painikkeen pituus on tarkoitettu käytettäväksi Planet ID:n mikrosirujen

32mm terän kanssa. Ruisku on uudelleenkäytettävä, suositustemme mukaisesti enintään 50 kertaa.



Luer-lukkokapselissa on mikrosiru ja steriili kuori. Ennen pakkauksen käyttöä on suotavaa lukea asetettava siru. Kapselin turvasuojus on kierrettävä injektioruiskuun liitännän vakauden varmistamiseksi. Turvasuojuksen poistamisen jälkeen yhdistelmä on käyttövalmis:

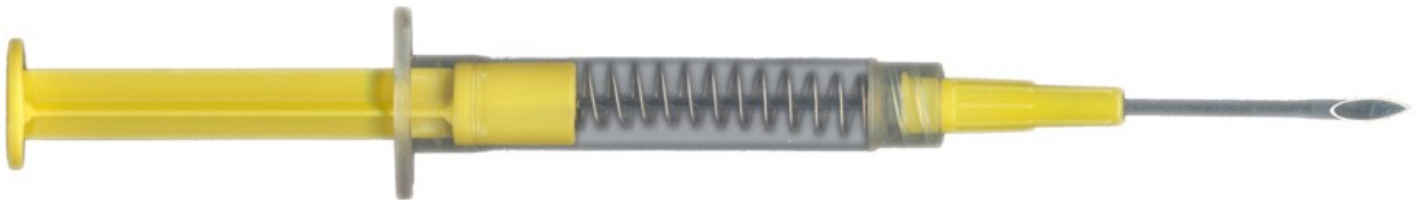

Mikrosirun asentamisen jälkeen steriili kuori jää keskelle viistettä osoituksena mikrosirun onnistuneesta injektioinnista:



steriili kuori

Lue mikrosiru asentamisen jälkeen uudelleen varmistaaksesi onnistuneen asennuksen.

Aseta turvasuojus takaisin paikalleen, poista terä ja heitä se pois. Säilytä injektioruisku tulevia injektioita varten.